

SOSTITUIRE UN CAVALIERE IN UNA PROTESI CON PRECI-CLIP

1. Prendete l'analogo del preformato **1707**, tagliate né un pezzo ed accorciatelo alla lunghezza del cavaliere (per ogni cavaliere). Praticate al lato inferiore delle ritenzioni per l'ancoraggio.
2. Spingete il preformato assieme al mantentore di spazio nel cavaliere della protesi e fabbricate un modello di gesso duro.
3. Liberare, fresando, il cavaliere vecchio dalla protesi e rimuovetelo.
4. Mettete il cavaliere nuovo **1105/1106/1125/1126** assieme al mantentore di spazio sul modello e fissatelo con della resina autopolimerizzante.
5. Attivate il cavaliere dopo la rifinitura, se necessario (vedi INFO 107).

Effetti collaterali, avvertenze e precauzioni

- Gli attacchi sono destinati ad un uso singolo.
- I prodotti sono non sterili.
- Esiste il rischio di tenuta insufficiente quando le condizioni del paziente cambiano.
- L'adesione dei batteri può essere evitata applicando misure di igiene.
- L'uso improprio o la lavorazione non corretta può causare l'usura premature degli attacchi.
- La funzionalità degli attacchi sarà negativamente influenzata dai traumi come digrignamento dentale (bruxismo).
- Ai fini della tracciabilità, Vi consigliamo di registrare il numero di lotto dei prodotti utilizzati nel file del paziente.
- Non riscaldare prodotti che contengono titanio.
- Non utilizzare prodotti che contengono nickel in caso di allergia al nickel.
- Gli accessori RE H 79 e H 35 devono essere utilizzati fuori dal cavo orale.