

RIBASARE O RIADATTARE UNA PROTESI CON PRECI-BALL

1. Rilevate un'impronta nella protesi. Le matrici devono essere poste correttamente sulle patrici.
2. Inserite l'analogo per modello **1201 D** nelle matrici della protesi.
3. Fate un modello di gesso duro.
4. Ribasate come di consueto. Utilizzate uno strumento per ribasature.
5. Attivate o disattivate la matrice dopo la rifinitura e lucidatura, se necessario (vedi INFO 053).

Effetti collaterali, avvertenze e precauzioni

- Gli attacchi sono destinati ad un uso singolo.
- I prodotti sono non sterili.
- Esiste il rischio di tenuta insufficiente quando le condizioni del paziente cambiano.
- L'adesione dei batteri può essere evitata applicando misure di igiene.
- L'uso improprio o la lavorazione non corretta può causare l'usura prematura degli attacchi.
- La funzionalità degli attacchi sarà negativamente influenzata dai traumi come digrignamento dentale (bruxismo).
- Ai fini della tracciabilità, Vi consigliamo di registrare il numero di lotto dei prodotti utilizzati nel file del paziente.
- Non riscaldare prodotti che contengono titanio.
- Non utilizzare prodotti che contengono nickel in caso di allergia al nickel.
- Gli accessori RE H 79 e H 35 devono essere utilizzati fuori dal cavo orale.