

**ATTIVARE O DISATTIVARE UNA MATRICE
IN UNA PROTESI CON PRECI-BALL**

ATTIVARE/STRINGERE LE LAMELLE DELLA MATRICE

Spingete l'attivatore **1220** con cautela e passo dopo passo nella matrice fino a quando avete raggiunto la ritenzione desiderata.

DISATTIVARE/ALLARGARE LE LAMELLE DELLA MATRICE

Spingete il disattivatore **1221** con cautela e passo dopo passo nella matrice fino a quando avete raggiunto la ritenzione desiderata.

Effetti collaterali, avvertenze e precauzioni

- Gli attacchi sono destinati ad un uso singolo.
- I prodotti sono non sterili.
- Esiste il rischio di tenuta insufficiente quando le condizioni del paziente cambiano.
- L'adesione dei batteri può essere evitata applicando misure di igiene.
- L'uso improprio o la lavorazione non corretta può causare l'usura prematura degli attacchi.
- La funzionalità degli attacchi sarà negativamente influenzata dai traumi come digrignamento dentale (bruxismo).
- Ai fini della tracciabilità, Vi consigliamo di registrare il numero di lotto dei prodotti utilizzati nel file del paziente.
- Non riscaldare prodotti che contengono titanio.
- Non utilizzare prodotti che contengono nickel in caso di allergia al nickel.
- Gli accessori RE H 79 e H 35 devono essere utilizzati fuori dal cavo orale.