

EXPANDO

Tendiguancia universale, intraorale in 3 misure

1. Bagnare leggermente l'expando.
2. Prendere l'expando tra il pollice, l'anulare e il dito medio e stringere completamente l'strumento. L'expando non si romperà.
3. Chiedere al paziente di aprire la bocca e inserire l'expando con il tendiguancia destra nella guancia destra.
4. Chiedere al paziente di chiudere leggermente la bocca - allargando l'apertura della bocca - e inserire la tendiguancia sinistra allontanando delicatamente l'angolo sinistro della bocca dai denti e tirando delicatamente l'expando nella guancia opposta verso l'esterno (verso il vestibolare).
5. Una volta che il paziente ha riaperto la bocca, guidare le labbra con il mignolo attraverso la sezione del reggilingua in modo che l'expando sia posizionato sulle labbra. Questo crea un cuscinetto tra l'expando e l'osso mascellare e previene la pressione dolorosa sull'osso durante il trattamento.
6. La lingua del paziente dovrebbe ora essere posizionata dietro il reggilingua.

L'expando non provoca nausea.

Se avete bisogno di più spazio nella zona posteriore, potete usare un dito della mano libera per tirare la guancia con il tendiguancia sul lato dove è necessario. Non spingerlo in bocca, in quanto ciò provocherebbe una pressione sul cuscinetto retromolare.

Expando può essere utilizzato durante il trattamento ed è adatto anche per l'esame orale.

Pulizia

Dopo l'uso, sterilizzazione in autoclave, ciclo lungo.

Non sottoporre a trattamento termico, non riscaldare oltre 110 °C.

Comportamento chimico dei disinfettanti sull'expando

Expando è realizzato in policarbonato di Makrolon e quindi estremamente resistente alla rottura.

Resistente

Soluzione di resorcinolo 1%
Lysoform
Lysoformin
Cloramina
Octozon 1 %
Maktol
Merfen
Odol

Non resistente

Tb-Lysoform
Sagrotan
Acido carbolico
DDT

Effetti collaterali, avvertenze e precauzioni

- Gli attacchi sono destinati ad un uso singolo.
- I prodotti sono non sterili.
- Esiste il rischio di tenuta insufficiente quando le condizioni del paziente cambiano.
- L'adesione dei batteri può essere evitata applicando misure di igiene.
- L'uso improprio o la lavorazione non corretta può causare l'usura prematura degli attacchi.
- La funzionalità degli attacchi sarà negativamente influenzata dai traumi come digrignamento dentale (bruxismo).
- Ai fini della tracciabilità, Vi consigliamo di registrare il numero di lotto dei prodotti utilizzati nel file del paziente.
- Non riscaldare prodotti che contengono titanio.
- Non utilizzare prodotti che contengono nickel in caso di allergia al nickel.
- Gli accessori RE H 79 e H 35 devono essere utilizzati fuori dal cavo orale.