

## **CONTROLLO DEL PARALLELISMO DEGLI ATTACCHI**

Il reciproco parallelismo tra gli attacchi cioè verso la direzione d'inserzione della protesì garantisce una piú lunga durata degli attacchi.

Componenti divergenti possono causare i seguenti problemi od una combinazione tra loro:

- inconsueta usura della matrice,
- inconsueta usura della patrice,
- rottura prematura della patrice.

Se la matrice mostra un'usura insolita, si può offrire anche una soluzione temporanea: la patrice è sostituita con una patrice sovra-dimensionata (vedi INFO 067). La situazione potrebbe essere così stabilizzata.

1. Svitare i bottoni a pressione (vedi INFO 063).
2. Avvitare l'accessorio

- **RE H 16** per **M2**
- **H 16** per **M3**

nell'anello di base e controllate visivamente il parallelismo verso l'altro. Gli accessori devono essere paralleli tra loro.

### **Effetti collaterali, avvertenze e precauzioni**

- Gli attacchi sono destinati ad un uso singolo.
- I prodotti sono non sterili.
- Esiste il rischio di tenuta insufficiente quando le condizioni del paziente cambiano.
- L'adesione dei batteri può essere evitata applicando misure di igiene.
- L'uso improprio o la lavorazione non corretta può causare l'usura premature degli attacchi.
- La funzionalità degli attacchi sarà negativamente influenzata dai traumi come digrignamento dentale (bruxismo).
- Ai fini della tracciabilità, Vi consigliamo di registrare il numero di lotto dei prodotti utilizzati nel file del paziente.
- Non riscaldare prodotti che contengono titanio.
- Non utilizzare prodotti che contengono nickel in caso di allergia al nickel.
- Gli accessori RE H 79 e H 35 devono essere utilizzati fuori dal cavo orale.