

## SOSTITUIRE UNA MATRICE ASSIALE

### PATRICE NELLA CAPPETTA RADICOLARE

Se la protesi è stata usata per alcuni anni, potrebbe essere necessario cambiare una matrice assiale ed il bottone a pressione per ripristinare la funzionalità dell'attacco. La sostituzione avviene **in bocca del paziente**.

1. Identificate l'attacco come un **M2** oppure un **M3** (vedi INFO 062 ed INFO 070).

### RIMUOVERE LA MATRICE

**Matrici ancorate nella resina:** scaldare uno strumento di modellazione, inserirlo nella matrice togliendola con movimenti laterali. Adattate l'apertura nella protesi alla nuova matrice creando un'apertura verso la zona linguale.

### NUOVO FISSAGGIO DELLA MATRICE

1. Usate questa opportunità per sostituire eventualmente il bottone a pressione (vedi INFO 063).
2. Mettete il rispettivo mantentore di spazio sul bottone a pressione.
3. Applicare una scarsa quantità di materiale dell'impronta nella matrice.
4. Completate l'attacco con la matrice nuova.

### MATRICE INGLOBATA NELLA RESINA

1. Mescolate un poco di resina autopolimerizzante di consistenza pastosa (possibilmente di un colore diverso della base protesica), mettendola nello spazio per la matrice e piazzate la protesi in bocca al paziente.
2. Il paziente non deve caricare la protesi.
3. Dopo l'indurimento della resina togliete il materiale in eccesso e controllate la ritenzione degli attacchi (vedi INFO 059).

### Effetti collaterali, avvertenze e precauzioni

- Gli attacchi sono destinati ad un uso singolo.
- I prodotti sono non sterili.
- Esiste il rischio di tenuta insufficiente quando le condizioni del paziente cambiano.
- L'adesione dei batteri può essere evitata applicando misure di igiene.
- L'uso improprio o la lavorazione non corretta può causare l'usura prematura degli attacchi.
- La funzionalità degli attacchi sarà negativamente influenzata dai traumi come digrignamento dentale (bruxismo).

## **Scheda informativa** **INFO 071.I-ed.E**

Data di rilascio: 01/03/17    Aggiornata in lingua il: 13/05/08

---

Pagina 2/2

- Ai fini della tracciabilità, Vi consigliamo di registrare il numero di lotto dei prodotti utilizzati nel file del paziente.
- Non riscaldare prodotti che contengono titanio.
- Non utilizzare prodotti che contengono nickel in caso di allergia al nickel.
- Gli accessori RE H 79 e H 35 devono essere utilizzati fuori dal cavo orale.