

CEMENTARE UNA COSTRUZIONE COMBINATA

Il modo di lavorare e la precisione durante la cementazione di una costruzione primaria sono veramente importanti. Essi garantiscono il parallelismo ed una più lunga durata del lavoro combinato.

1. Controllate se le parti della costruzione sono ben assestate in bocca.
2. Cospargete i mantenitori di spazio di un po' di vaselina ed applicateli sui bottoni a pressione.
3. Cementate la costruzione primaria.
4. Subito dopo spingete la costruzione secondaria sopra la costruzione primaria e portate le mascelle del paziente manualmente in relazione centrica.
5. Lasciate il cemento indurire sufficientemente.
6. Togliete la costruzione secondaria ed i resti di cemento dalle parti primari e/o secondari.
7. Controllate lo scatto e la ritenzione degli attacchi (vedi INFO 059).

Effetti collaterali, avvertenze e precauzioni

- Gli attacchi sono destinati ad un uso singolo.
- I prodotti sono non sterili.
- Esiste il rischio di tenuta insufficiente quando le condizioni del paziente cambiano.
- L'adesione dei batteri può essere evitata applicando misure di igiene.
- L'uso improprio o la lavorazione non corretta può causare l'usura premature degli attacchi.
- La funzionalità degli attacchi sarà negativamente influenzata dai traumi come digrignamento dentale (bruxismo).
- Ai fini della tracciabilità, Vi consigliamo di registrare il numero di lotto dei prodotti utilizzati nel file del paziente.
- Non riscaldare prodotti che contengono titanio.
- Non utilizzare prodotti che contengono nickel in caso di allergia al nickel.
- Gli accessori RE H 79 e H 35 devono essere utilizzati fuori dal cavo orale.