

RIFACIMENTO DI UNA PROTESI M2 CON MATRICI USURATE

Quando si deve costruire una protesi nuova e le matrici della costruzione primaria sono usurate, procedete come segue.

STUDIO ODONTOIATRICO

1. Completate l'accessorio per la presa dell'impronta **RE H 14** con il bottone a pressione sovradimensionato **RE 0031/195**.
2. Mettete questa combinazione nella matrice in bocca del paziente con il mantentore di spazio **RE 0096**.
3. La combinazione deve essere assolutamente stabile nella matrice. Altrimenti attivate il bottone (vedi INFO 059).
4. Riempite lo spazio sotto la matrice con della cera morbida.
5. Prendete un'impronta di tutta l'arcata dentale con un portaimpronta individuale.

LABORATORIO

1. Completate l'accessorio per la presa dell'impronta combinata **RE H 14** con un bottone a pressione **RE 0031**, un mantentore di spazio **RE 0096** e l'accessorio per modello **RE H 13**.
2. Inserite questa combinazione nell'impronta.
3. Fate un modello di gesso duro nel quale disporrete gli analoghi per modello.
4. Utilizzate per tutta la lavorazione sempre il mantentore di spazio **RE 0096**.
5. Fabbricate una nuova costruzione secondaria.
6. Sostituite dopo l'ultimazione della nuova protesi i bottoni utilizzati **RE 0031** con quelli sovradimensionati utilizzati per l'impronta.

Effetti collaterali, avvertenze e precauzioni

- Gli attacchi sono destinati ad un uso singolo.
- I prodotti sono non sterili.
- Esiste il rischio di tenuta insufficiente quando le condizioni del paziente cambiano.
- L'adesione dei batteri può essere evitata applicando misure di igiene.
- L'uso improprio o la lavorazione non corretta può causare l'usura premature degli attacchi.
- La funzionalità degli attacchi sarà negativamente influenzata dai traumi come digrignamento dentale (bruxismo).
- Ai fini della tracciabilità, Vi consigliamo di registrare il numero di lotto dei prodotti utilizzati nel file del paziente.
- Non riscaldare prodotti che contengono titanio.
- Non utilizzare prodotti che contengono nickel in caso di allergia al nickel.
- Gli accessori RE H 79 e H 35 devono essere utilizzati fuori dal cavo orale.