

RIFACIMENTO DI UNA PROTESI M3 CON MATRICI USURATE

Quando si deve costruire una protesi nuova e le matrici della costruzione primaria sono usurate, procedete come segue.

STUDIO ODONTOIATRICO

1. Stabilite con l'accessorio **H 30** il diametro del bottone per la protesi nuova (vedi INFO 067).
2. Adattate la forma del portaimpronta.
3. Completate l'accessorio per la presa dell'impronta **H 14** con il bottone sovradimensionato scelto ed il mantentore di spazio. Inserite questa combinazione nella matrice in bocca.
4. La combinazione degli accessori deve essere assolutamente stabile nella matrice. Altrimenti attivate il bottone (vedi INFO 059).
5. Riempite lo spazio sotto la matrice con della cera morbida.
6. Prendete un'impronta di tutta l'arcata dentale con un portaimpronta individuale.

LABORATORIO

1. Sostituite il bottone sovradimensionato utilizzato per l'impronta con un bottone normale **694 C**. Completate l'accessorio per la presa dell'impronta **H 14** compreso il bottone **694 C** con il mantentore di spazio **694 B** e l'analogo per modello **H 13**.
2. Inserite questa combinazione nell'impronta.
3. Fate un modello di gesso duro nel quale disporrete gli analoghi per modello.
4. Fabbricate una nuova costruzione secondaria.
5. Sostituite dopo l'ultimazione della nuova protesi i bottoni normali **694 C** con quelli sovradimensionati utilizzati per l'impronta.

Effetti collaterali, avvertenze e precauzioni

- Gli attacchi sono destinati ad un uso singolo.
- I prodotti sono non sterili.
- Esiste il rischio di tenuta insufficiente quando le condizioni del paziente cambiano.
- L'adesione dei batteri può essere evitata applicando misure di igiene.
- L'uso improprio o la lavorazione non corretta può causare l'usura prematura degli attacchi.
- La funzionalità degli attacchi sarà negativamente influenzata dai traumi come digrignamento dentale (bruxismo).
- Ai fini della tracciabilità, Vi consigliamo di registrare il numero di lotto dei prodotti utilizzati nel file del paziente.
- Non riscaldare prodotti che contengono titanio.
- Non utilizzare prodotti che contengono nickel in caso di allergia al nickel.
- Gli accessori RE H 79 e H 35 devono essere utilizzati fuori dal cavo orale.