

**TECNICA DI LAVORAZIONE DEL PREFORMATO PRECI-HORIX
IN PLASTICWAX**

1. Prendete un'impronta di partenza completa. Modellate le cappette radicolari e/o le corone. In caso di costruzioni su impianti, munite gli analoghi con dei cilindri per sovrapposizione oppure di resina.
2. Accorciate il preformato in PLASTICWAX **1734** alla lunghezza corrispondente e fissatelo per mezzo del mandrino per il parallelometro **1708** tra le cappette radicolari, corone o cilindri.
3. Il preformato non deve essere deformato. Raffreddatelo, se necessario, con acqua. Adattate la parte basale della barra all'andamento della gengiva e fissatela con della cera.
4. Se desiderate munire il preformato di un canale di fusione o aerazione supplementare, bisogna applicarlo alla zona basale del preformato.
5. Fondete la costruzione con una lega dura.
6. Rifinite e lucidate dopo la fusione come di consueto. Fate attenzione di non asportare troppo materiale dal preformato.
7. Mettete la costruzione sul modello ed applicate i mantenitori di spazio **1703**. Accorciate i mantenitori, se opportuno, per farli aderire completamente alla barra.
8. Chiudete i sottosquadri della barra con un materiale duro (cemento o silicone). I mantenitori di spazio devono rimanere liberi. Ricoprite anche il lato scoperto, superiore della barra.
9. Isolate.
10. Applicate un alloggiamento **1706** sul mantenitore di spazio **1703** (si consiglia) (vedi INFO 009).
11. Ultimate la protesi come di consueto.
12. Dopo la polimerizzazione, tagliate i mantenitori di spazio con un bisturi ed eliminateli. Spingete i cavalieri nei posti previsti con l'accessorio per l'inserzione **1705** allegato. I cavalieri devono ingranarsi percettibilmente.
13. Impiegate i cavalieri rossi o bianchi se la ritenzione è troppo debole o troppo forte (vedi INFO 016).

Effetti collaterali, avvertenze e precauzioni

- Gli attacchi sono destinati ad un uso singolo.
- I prodotti sono non sterili.
- Esiste il rischio di tenuta insufficiente quando le condizioni del paziente cambiano.
- L'adesione dei batteri può essere evitata applicando misure di igiene.
- L'uso improprio o la lavorazione non corretta può causare l'usura prematura degli attacchi.
- La funzionalità degli attacchi sarà negativamente influenzata dai traumi come digrignamento dentale (bruxismo).
- Ai fini della tracciabilità, Vi consigliamo di registrare il numero di lotto dei prodotti utilizzati nel file del paziente.

Scheda informativa INFO 111.I-ed.C

Data di rilascio: 01/03/17 Aggiornata in lingua it: 01/09/06

Pagina 2/2

- Non riscaldare prodotti che contengono titanio.
- Non utilizzare prodotti che contengono nickel in caso di allergia al nickel.
- Gli accessori RE H 79 e H 35 devono essere utilizzati fuori dal cavo orale.