

SOSTITUIRE UNA PARTE RITENTIVA SALDATA

Durante la lavorazione in laboratorio oppure dopo che la protesi sia stata portata per tempo prolungato, può essere necessario cambiare la parte ritentiva saldata **RE 0061 (M2)** oppure **694 AS (M3)** a causa di un piazzamento errato o una filettatura danneggiata.

1. Identificate il bottone a pressione come un **M2** oppure un **M3** – dinamico o rigido (vedi INFO 062).
2. Ponete in caso di un:
 - **M2** un analogo per modello **RE H 13** con il mantentore di spazio **RE 0096**
 - **M3** (dinamico) un analogo per modello **H 13** con il mantentore di spazio **694 B**
 - **M3** (rigido) un analogo per modello **H 13** senza mantentore di spazio sul bottone da lavoro nella protesi.
3. Fate un modello da lavoro nel quale sono disporrete gli analoghi per modello.
4. Preparate una mascherina di gesso delle parti di resina della protesi (denti e selle).
5. Svitare il bottone a pressione dalla parte ritentiva.
6. Rimuovete le parti di resina dalla protesi.
7. Staccate la parte ritentiva da sostituire con una fresa oppure una microfiamma.
8. Applicare del flux sulle parti della protesi che non devono ossidare.
9. Eliminate accuratamente tutti residui di saldame.
10. Completate la nuova parte ritentiva con un **nuovo** bottone (patrice):
 - **M2:** **RE 0061** + **RE 0031** + **RE 0096**
 - **M3:** dinamico **694 C** + **694 B**
 - **M3:** rigido **724 C**
12. Inserite la parte ritentiva completata nell'analogo per modello.
13. Saldare la parte ritentiva alla costruzione secondaria.

Effetti collaterali, avvertenze e precauzioni

- Gli attacchi sono destinati ad un uso singolo.
- I prodotti sono non sterili.
- Esiste il rischio di tenuta insufficiente quando le condizioni del paziente cambiano.
- L'adesione dei batteri può essere evitata applicando misure di igiene.
- L'uso improprio o la lavorazione non corretta può causare l'usura premature degli attacchi.
- La funzionalità degli attacchi sarà negativamente influenzata dai traumi come digrignamento dentale (bruxismo).
- Ai fini della tracciabilità, Vi consigliamo di registrare il numero di lotto dei prodotti utilizzati nel file del paziente.
- Non riscaldare prodotti che contengono titanio.
- Non utilizzare prodotti che contengono nickel in caso di allergia al nickel.
- Gli accessori RE H 79 e H 35 devono essere utilizzati fuori dal cavo orale.

Scheda informativa INFO 112.I-ed.D

Data di rilascio: 01/03/17 Aggiornata in lingua il: 01/03/07
