

**TECNICA DI LAVORAZIONE DI UNA PATRICE DEI
PRECI-CLIX TI-P/P-P**

1. Stabilite la direzione d'inserzione della protesi.
2. Scegliete il portapatrice **RE 04 TI** in plastica adatto e spingete la patrice **1281 C** nella cavità.
3. Mettete cautamente il mandrino per il parallelometro **1201 P** sulla patrice.
4. Adattate il preformato in plastica alla forma, posizione ed altezza delle corone pilastro.
5. Fissate il portapatrice con della cera alle corone pilastro. Rimuovete il mandrino per il parallelometro.
6. Applicare i perni di colata alle corone e preparate per la messa in rivestimento.
7. Rivestite, preriscaldare e fondete con una lega dura. Non utilizzate rivestimenti rapidi (speed).
8. Sabbiate la fusione senza danneggiare la patrice. Usate la fresa cava **1230**.
9. Rifinite la fusione con cautela in modo da non asportare troppo materiale dalla sfera. Lucidate a specchio.

Effetti collaterali, avvertenze e precauzioni

- Gli attacchi sono destinati ad un uso singolo.
- I prodotti sono non sterili.
- Esiste il rischio di tenuta insufficiente quando le condizioni del paziente cambiano.
- L'adesione dei batteri può essere evitata applicando misure di igiene.
- L'uso improprio o la lavorazione non corretta può causare l'usura premature degli attacchi.
- La funzionalità degli attacchi sarà negativamente influenzata dai traumi come digrignamento dentale (bruxismo).
- Ai fini della tracciabilità, Vi consigliamo di registrare il numero di lotto dei prodotti utilizzati nel file del paziente.
- Non riscaldare prodotti che contengono titanio.
- Non utilizzare prodotti che contengono nickel in caso di allergia al nickel.
- Gli accessori RE H 79 e H 35 devono essere utilizzati fuori dal cavo orale.