

COSTRUZIONE DI UNA NUOVA PROTESI CON PRECI-CLIX

STUDIO ODONTOIATRICO

1. Chiudete i sottosquadri nella zona della matrice con della cera morbida.
2. Prendete un'impronta con un portaimpronta individuale di tutta l'arcata dentale.

LABORATORIO

1. Mettete l'analogo per modello **1201 D** oppure la combinazione **RE H 14 + 1206 C** nell'impronta.
2. Colate un modello da lavoro con gli analoghi per modello inseriti.
3. Fate una nuova costruzione secondaria.

Effetti collaterali, avvertenze e precauzioni

- Gli attacchi sono destinati ad un uso singolo.
- I prodotti sono non sterili.
- Esiste il rischio di tenuta insufficiente quando le condizioni del paziente cambiano.
- L'adesione dei batteri può essere evitata applicando misure di igiene.
- L'uso improprio o la lavorazione non corretta può causare l'usura premature degli attacchi.
- La funzionalità degli attacchi sarà negativamente influenzata dai traumi come digrignamento dentale (bruxismo).
- Ai fini della tracciabilità, Vi consigliamo di registrare il numero di lotto dei prodotti utilizzati nel file del paziente.
- Non riscaldare prodotti che contengono titanio.
- Non utilizzare prodotti che contengono nickel in caso di allergia al nickel.
- Gli accessori RE H 79 e H 35 devono essere utilizzati fuori dal cavo orale.