

## **TRASFORMAZIONE DEL REVAX TI EXTRACORONALE M 2 IN PRECI-CLIX**

In caso di ripetuta frattura di bottoni a pressione in una protesi tradizionale extracoronale, può essere opportuno di trasformare la costruzione in una costruzione con PRECI-CLIX, perché qui sono le matrici le parti elastiche.

Dato che **REVAX RE 0161 TI, RE 0175 TI, RE 0185 TI, RE 0195 TI** e **PRECI-CLIX TI** hanno un portamatrice/patrice con lo stesso diametro, ciò può avvenire senza problemi.

### **STUDIO ODONTOIATRICO**

1. Togliete la matrice ed il **CEKA SITE** con una punta diamantata raffreddata dalle sua sede.
2. Fate attenzione che la cavità rimanga cilindrica.
3. Pulite ed asciugate la sede così creata.
4. Incollate nella sede, con del **CEKA SITE**, una patrice di titanio **1271 C**.
5. Dopo l'indurimento, rimuovete il composito in eccesso.
6. Togliete la combinazione della patrice dalla protesi.
7. Adattate l'apertura nella protesi al diametro della nuova matrice (diametro 4,5 mm ed altezza 3,5 mm) e forate la protesi di resina in direzione linguale.
8. Per mezzo dell'accessorio per l'inserzione **1222**, spingete una matrice **1234** nell'alloggiamento di titanio **1235**.
9. Completate la patrice con il mantentore di spazio **1251 B** e la combinazione di matrice.
10. Impastate un po' di resina autopolimerizzante in modo pastoso (possibilmente in un colore diverso dalla base protesica), applicatelo nell'incavo per la matrice e piazzate la protesi in bocca al paziente. Il paziente non deve caricare la protesi.
11. Dopo l'indurimento della resina, togliete il materiale in eccesso ed il mantentore di spazio.

### **Effetti collaterali, avvertenze e precauzioni**

- Gli attacchi sono destinati ad un uso singolo.
- I prodotti sono non sterili.
- Esiste il rischio di tenuta insufficiente quando le condizioni del paziente cambiano.
- L'adesione dei batteri può essere evitata applicando misure di igiene.
- L'uso improprio o la lavorazione non corretta può causare l'usura premature degli attacchi.
- La funzionalità degli attacchi sarà negativamente influenzata dai traumi come digrignamento dentale (bruxismo).
- Ai fini della tracciabilità, Vi consigliamo di registrare il numero di lotto dei prodotti utilizzati nel file del paziente.
- Non riscaldare prodotti che contengono titanio.
- Non utilizzare prodotti che contengono nickel in caso di allergia al nickel.
- Gli accessori RE H 79 e H 35 devono essere utilizzati fuori dal cavo orale.