

TECNICA DI LAVORAZIONE DEL PRECI-52

1. Stabilite la direzione d'inserzione della protesi.
2. Inserite la matrice nel mandrino per il parallelometro **1551 P** (U - Mini \varnothing 3,15 mm) oppure **1556 P** (S - Standard \varnothing 3,40 mm).
3. Incorporate le matrici **1561** (U - Mini \varnothing 3,15 mm) oppure **1566** (S - Standard \varnothing 3,40 mm) nella modellazione delle corone sulla cresta alveolare, il più vicino possibile alla gengiva ed ai denti pilastro.
4. Accorciate la piastrina posteriore della matrice, se necessario.
5. Mettete le corone in pre-rivestimento.
6. Fondete e smuffolate le corone. Sabbiate le matrici cautamente con perle di silicato autolucidanti e lavorate con una bassa pressione.
7. Mettete le corone con le matrici sui monconi.
8. Spingete la patrice nella matrice (la superficie della patrice deve trovarsi sul piano occlusale della matrice). Per un ottimo appoggio della protesi parziale, la patrice deve trovarsi ad almeno 1 mm di distanza della gengiva, al limite ultimo della sua rotazione.
9. Bloccate l'alloggiamento con l'adesivo sulle ritenzioni dello scheletrato.
10. Svitare la parte interna della patrice **1563** (U - Mini \varnothing 3,15 mm) oppure **1568** (S - Standard \varnothing 3,40 mm) e rimuovetela dell'alloggiamento con la chiave a stella **1570**.
11. Fissate un tappo per polimerizzazione universale **1564** (Mini & Standard) per evitare un debordare del gesso o della resina durante le fasi di lavorazione.
12. Il tappo per polimerizzazione tiene l'alloggiamento nella sua corretta posizione durante l'indurimento.
13. Svitare il tappo per polimerizzazione dopo l'indurimento, la rifinitura e la pulizia, ed avvitate la parte interna della patrice **1563** (U - Mini \varnothing 3,15 mm) oppure **1568** (S - Standard \varnothing 3,40 mm) con la chiave a stella **1570**.

Effetti collaterali, avvertenze e precauzioni

- Gli attacchi sono destinati ad un uso singolo.
- I prodotti sono non sterili.
- Esiste il rischio di tenuta insufficiente quando le condizioni del paziente cambiano.
- L'adesione dei batteri può essere evitata applicando misure di igiene.
- L'uso improprio o la lavorazione non corretta può causare l'usura premature degli attacchi.
- La funzionalità degli attacchi sarà negativamente influenzata dai traumi come digrignamento dentale (bruxismo).
- Ai fini della tracciabilità, Vi consigliamo di registrare il numero di lotto dei prodotti utilizzati nel file del paziente.
- Non riscaldare prodotti che contengono titanio.
- Non utilizzare prodotti che contengono nickel in caso di allergia al nickel.
- Gli accessori RE H 79 e H 35 devono essere utilizzati fuori dal cavo orale.