

RIBASARE O RIADATTARE UNA PROTESI CON PRECI-52

1. Mettete del materiale d'impronta nella zona basale della protesi e portate la protesi manualmente in relazione centrica.
2. Svitare la parte interna della patrice **1563** (U - Mini \varnothing 3,15 mm) oppure **1568** (S - Standard \varnothing 3,40 mm) tramite la chiave a stella **1570**.
3. Avvitare il tappo per polimerizzazione **1564** nella filettatura interna dell'alloggiamento.
4. Fate un modello di gesso duro.
5. Ribasate come di consueto, usando un ribasatore o una muffola.
6. Rifinite la resina della protesi.
7. Svitare il tappo per polimerizzazione **1564** dell'alloggiamento e sostituitelo con una parte interna della patrice **1563** (U - Mini \varnothing 3,15 mm) oppure **1568** (S - Standard \varnothing 3,40 mm) tramite la chiave a stella **1570**.
8. Inserite la protesi.
9. Se necessario, adattate la ritenzione della patrice, mantenendo la patrice sferica con uno strumento e serrando o allentando la ghieretta tramite la chiave a stella **1570**.

Effetti collaterali, avvertenze e precauzioni

- Gli attacchi sono destinati ad un uso singolo.
- I prodotti sono non sterili.
- Esiste il rischio di tenuta insufficiente quando le condizioni del paziente cambiano.
- L'adesione dei batteri può essere evitata applicando misure di igiene.
- L'uso improprio o la lavorazione non corretta può causare l'usura prematura degli attacchi.
- La funzionalità degli attacchi sarà negativamente influenzata dai traumi come digrignamento dentale (bruxismo).
- Ai fini della tracciabilità, Vi consigliamo di registrare il numero di lotto dei prodotti utilizzati nel file del paziente.
- Non riscaldare prodotti che contengono titanio.
- Non utilizzare prodotti che contengono nickel in caso di allergia al nickel.
- Gli accessori RE H 79 e H 35 devono essere utilizzati fuori dal cavo orale.