

REBASEN/RELINEN VAN EEN PROTHESE MET PRECI-VERTIX

1. Breng afdruk materiaal op de gingivale zijde van de prothese aan en neem een afdruk.
2. Verwijder de matrixen met een scherp metalen instrument uit de prothese.
3. Vul de metaalmantels volledig op met silicone.
4. Giet een model in hardgips en gips in een rebasingklem.
5. Werk verder zoals gebruikelijk.
6. Verwijder de silicone uit de metaalmantels en druk nieuwe matrixen in (zie INFO 026).

Bijwerkingen, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- De attachmenten zijn bestemd voor eenmalig gebruik.
- De producten zijn niet-steriel.
- De pasvorm kan negatief beïnvloed worden als de toestand van de patiënt verandert.
- Bacteriële adhesie kan door hygiënemaatregelen worden voorkomen.
- Oneigenlijk gebruik of onjuiste verwerking kan resulteren in vroegtijdige slijtage van de attachmenten.
- De functionaliteit van de attachmenten wordt negatief beïnvloed door trauma's zoals tandenknarsen (bruxisme).
- Met het oog op de traceerbaarheid raden wij u aan om het lotnummer van de gebruikte producten te vermelden in het patiëntendossier.
- Producten met titanium niet verwarmen.
- Producten met nikkel niet gebruiken bij nikkelallergie.
- De hulpdelen RE H 79 en H 35 moeten buiten de mond worden gebruikt.