

REBASEN/RELINEN VAN EEN PROTHESE MET PRECI-CLIP

1. Neem in de prothese een afdruk met de ruiters op hun plaats.
2. Vul de ruimte van de ruiters en de steeg op met silicone en giet een model in hardgips. Gebruik een rebasingklem.
3. Voer de rebasing of relining door zoals gebruikelijk.
4. Activeer of desactiveer eventueel de ruiters na het afwerken en polijsten (zie INFO 107).

Bijwerkingen, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- De attachmenten zijn bestemd voor eenmalig gebruik.
- De producten zijn niet-steriel.
- De pasvorm kan negatief beïnvloed worden als de toestand van de patiënt verandert.
- Bacteriële adhesie kan door hygiënemaatregelen worden voorkomen.
- Oneigenlijk gebruik of onjuiste verwerking kan resulteren in vroegtijdige slijtage van de attachmenten.
- De functionaliteit van de attachmenten wordt negatief beïnvloed door trauma's zoals tandenknarsen (bruxisme).
- Met het oog op de traceerbaarheid raden wij u aan om het lotnummer van de gebruikte producten te vermelden in het patiëntendossier.
- Producten met titanium niet verwarmen.
- Producten met nikkel niet gebruiken bij nikkelallergie.
- De hulpdelen RE H 79 en H 35 moeten buiten de mond worden gebruikt.