

VERNIEUWEN VAN EEN PROTHESE MET PRECI-BALL

1. Neem een afdruk van de mondsituatie.
2. Plaats de modelanaloog **1201 D** in de afdruk en maak een model in hardgips.
3. Leg de grote plaatshouder **RA 0055** over de patrix op de stiftwortelkap en vul de ruimte ter hoogte van de papilla met gips op. Pas de plaatshouder hierop aan, zodat hij 1 tot 1,5 mm over de tandvleespapilla reikt.
4. Vul de matrix half op met silicone en druk ze over de patrix. De pvc-ring mag alleen rond de lamellen van de matrix liggen. De retentietafel bovenop de matrix moet vrij blijven.
5. Zet de waspas op het model. Maak alles klaar om in te bedden.
6. Werk alles verder af.
7. Neem na het polymeriseren de plaatshouder weg. Verwijder de pvc-ring niet.
8. Test de retentie uit en activeer indien nodig de matrix (zie INFO 053).

Bijwerkingen, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- De attachmenten zijn bestemd voor eenmalig gebruik.
- De producten zijn niet-steriel.
- De pasvorm kan negatief beïnvloed worden als de toestand van de patiënt verandert.
- Bacteriële adhesie kan door hygiënemaatregelen worden voorkomen.
- Oneigenlijk gebruik of onjuiste verwerking kan resulteren in vroegtijdige slijtage van de attachmenten.
- De functionaliteit van de attachmenten wordt negatief beïnvloed door trauma's zoals tandenknarsen (bruxisme).
- Met het oog op de traceerbaarheid raden wij u aan om het lotnummer van de gebruikte producten te vermelden in het patiëntendossier.
- Producten met titanium niet verwarmen.
- Producten met nikkel niet gebruiken bij nikkelallergie.
- De hulpdelen RE H 79 en H 35 moeten buiten de mond worden gebruikt.