

ACTIVEREN EN DESACTIVEREN VAN EEN MATRIX IN EEN PROTHESE MET PRECI-BALL

ACTIVEREN/SAMENDRUKKEN VAN DE MATRIXLAMELLEN

Druk het activeerinstrument **1220** voorzichtig en stapsgewijs in de matrix, tot de gewenste retentie bekomen wordt.

DESACTIVEREN/SPREIDEN VAN DE MATRIXLAMELLEN

Druk het desactiveerinstrument **1221** voorzichtig en stapsgewijs over de matrix, tot de gewenste retentie bekomen wordt.

Bijwerkingen, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- De attachmenten zijn bestemd voor eenmalig gebruik.
- De producten zijn niet-steriel.
- De pasvorm kan negatief beïnvloed worden als de toestand van de patiënt verandert.
- Bacteriële adhesie kan door hygiënemaatregelen worden voorkomen.
- Oneigenlijk gebruik of onjuiste verwerking kan resulteren in vroegtijdige slijtage van de attachmenten.
- De functionaliteit van de attachmenten wordt negatief beïnvloed door trauma's zoals tandenknarsen (bruxisme).
- Met het oog op de traceerbaarheid raden wij u aan om het lotnummer van de gebruikte producten te vermelden in het patiëntendossier.
- Producten met titanium niet verwarmen.
- Producten met nikkel niet gebruiken bij nikkelallergie.
- De hulpdelen RE H 79 en H 35 moeten buiten de mond worden gebruikt.