

VERVANGEN VAN EEN MATRIX IN EEN PROTHESE MET PRECI-BALL

1. Druk de modelanalooq **1201 D** in de te vervangen matrix in de prothese.
2. Maak een model in hardgips.
3. Slijp de oude matrix uit de prothese en maak voldoende ruimte vrij. Slijp een opening naar linguaal in de prothese.
4. Vul een nieuwe matrix **1201 A**, **1205 A** of **1207 A + 694 AKS2** half op met silicone en druk ze over de modelanalooq. Vergeet de plaatshouder niet. De pvc-ring mag alleen rond de lamellen van de matrix liggen. De retentietafel bovenop de matrix moet vrij blijven.
5. Zet de prothese op het model en laat autopolymeriserende kunststof invloeien.
6. Werk alles verder af.
7. Verwijder de pvc-ring niet.
8. Test de retentie uit en activeer indien nodig de matrix (zie INFO 053).

Bijwerkingen, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- De attachmenten zijn bestemd voor eenmalig gebruik.
- De producten zijn niet-steriel.
- De pasvorm kan negatief beïnvloed worden als de toestand van de patiënt verandert.
- Bacteriële adhesie kan door hygiënemaatregelen worden voorkomen.
- Oneigenlijk gebruik of onjuiste verwerking kan resulteren in vroegtijdige slijtage van de attachmenten.
- De functionaliteit van de attachmenten wordt negatief beïnvloed door trauma's zoals tandenknarsen (bruxisme).
- Met het oog op de traceerbaarheid raden wij u aan om het lotnummer van de gebruikte producten te vermelden in het patiëntendossier.
- Producten met titanium niet verwarmen.
- Producten met nikkel niet gebruiken bij nikkelallergie.
- De hulpdelen RE H 79 en H 35 moeten buiten de mond worden gebruikt.