

REBASEN VAN EEN AXIALE PROTHESE (M2 & M3)

Een goed onderhoud van een uitneembare prothese vereist het regelmatig aanpassen of vernieuwen van de prothesebasis. In beide gevallen is de procedure voor het dentaalteam praktisch identiek.

TANDARTSPRAKTIJK

1. Controleer de retentie van de drukknop (zie INFO 059).
2. Leg de plaatshouder **RE 0096 (M2)** of **694 B (M3)** met vaseline op de drukknop in de mond.
3. Breng "stops" uit zachte kneedmassa aan de basale zijde van de prothese aan, ter hoogte van het trigonum retromolare resp. de tuber maxillaris.
4. Breng de patiënt manueel in centrische relatie en behoud deze positie tijdens de uithardingstijd van de kneedmassa.
5. Breng vervolgens afdrukmetaal in de prothese en neem een afdruk. Controleer of de drukknop goed insnapt.
6. Verwijder het afdrukmetaal uit de matrix.

LABORATORIUM

1. Combineer voor:
M2: RE H 14 (modelanaloo) + **RE 0031** (drukknop) + **RE 0096** (plaatshouder);
M3: H 14 (modelanaloo) + **694 C** (drukknop) + **694 B** (plaatshouder).
2. Druk deze eenheid in de matrix.
3. Giet een hardgipsmodel en bereid het voor een rebasing/relining voor.
4. Controleer en vervang eventueel de matrix (zie INFO 071).
5. Completeer het volledige attachment op de modelanaloo **RE H 14 (M2)** of **H 14 (M3)**.
6. Pas de grote plaatshouder **RA 0055 (M2)** of **691 E (M3)** over de replica van de stiftwortelkap en over 1 mm van het omliggende tandvlees aan.
7. Breng een kleine hoeveelheid afdrukmetaal in de matrix aan en rebase/reline zoals gebruikelijk.

Bijwerkingen, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- De attachmenten zijn bestemd voor eenmalig gebruik.
- De producten zijn niet-steriel.
- De pasvorm kan negatief beïnvloed worden als de toestand van de patiënt verandert.
- Bacteriële adhesie kan door hygiënemaatregelen worden voorkomen.
- Oneigenlijk gebruik of onjuiste verwerking kan resulteren in vroegtijdige slijtage van de attachmenten.
- De functionaliteit van de attachmenten wordt negatief beïnvloed door trauma's zoals tandenknarsen (bruxisme).

- Met het oog op de traceerbaarheid raden wij u aan om het lotnummer van de gebruikte producten te vermelden in het patiëntendossier.
- Producten met titanium niet verwarmen.
- Producten met nikkel niet gebruiken bij nikkelallergie.
- De hulpdelen RE H 79 en H 35 moeten buiten de mond worden gebruikt.