

CEMENTEREN VAN EEN COMBINATIEWERK

De procedure en de precisie tijdens het cementeren van een primaire constructie is van primordiaal belang. Het is de garantie voor het behoud van het parallelisme en zodoende ook voor een langdurig gebruik van een combinatiewerk.

1. Controleer alle onderdelen van de constructie afzonderlijk en vervolgens gezamenlijk op hun goede pas in de mond.
2. Wrijf een weinig vaseline over de plaatshouders en bevestig deze over de drukknoppen.
3. Cementeer de primaire constructie.
4. Druk de uitneembare prothese onmiddellijk op haar plaats en breng de patiënt manueel in centrische relatie.
5. Laat het cement voldoende lang harden.
6. Verwijder de secundaire constructie en alle cementresten aan primaire of secundaire gedeeltes.
7. Controleer het insnappen van de attachementen en hun retentie (zie INFO 059 en INFO 069).

Bijwerkingen, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- De attachementen zijn bestemd voor eenmalig gebruik.
- De producten zijn niet-steriel.
- De pasvorm kan negatief beïnvloed worden als de toestand van de patiënt verandert.
- Bacteriële adhesie kan door hygiënemaatregelen worden voorkomen.
- Oneigenlijk gebruik of onjuiste verwerking kan resulteren in vroegtijdige slijtage van de attachementen.
- De functionaliteit van de attachementen wordt negatief beïnvloed door trauma's zoals tandenknarsen (bruxisme).
- Met het oog op de traceerbaarheid raden wij u aan om het lotnummer van de gebruikte producten te vermelden in het patiëntendossier.
- Producten met titanium niet verwarmen.
- Producten met nikkel niet gebruiken bij nikkelallergie.
- De hulpdelen RE H 79 en H 35 moeten buiten de mond worden gebruikt.