

ACTIVEREN VAN EEN PRECI-CLIP-RUITER

1. Neem een breed instrument en druk voorzichtig met het brede vlak van het instrument tussen de vrijliggende gedeelten van de ruiters en de kunststof.
2. Vermijd dat de ruiters aan de ene zijde meer geactiveerd wordt dan aan de andere zijde.
3. Controleer telkens of er genoeg retentie voorhanden is.

Bijwerkingen, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- De attachementen zijn bestemd voor eenmalig gebruik.
- De producten zijn niet-steriel.
- De pasvorm kan negatief beïnvloed worden als de toestand van de patiënt verandert.
- Bacteriële adhesie kan door hygiënemaatregelen worden voorkomen.
- Oneigenlijk gebruik of onjuiste verwerking kan resulteren in vroegtijdige slijtage van de attachementen.
- De functionaliteit van de attachementen wordt negatief beïnvloed door trauma's zoals tandenknarsen (bruxisme).
- Met het oog op de traceerbaarheid raden wij u aan om het lotnummer van de gebruikte producten te vermelden in het patiëntendossier.
- Producten met titanium niet verwarmen.
- Producten met nikkel niet gebruiken bij nikkelallergie.
- De hulpdelen RE H 79 en H 35 moeten buiten de mond worden gebruikt.