

## VERVANGEN VAN EEN PRECI-CLIX-MATRIX

PRECI-CLIX-attachementen worden met de gele standaardmatrixen **1231** geleverd.

Wanneer de retentie van deze matrix niet voldoet aan de gestelde eisen, kan men ze vervangen door een witte matrix **1232** die minder retentie geeft of door een rode matrix **1233** die meer retentie geeft.

1. Plooi de matrixlippen met een scherp instrument (aangescherpte boor) naar binnen.
2. Boor met een kopsnijdende hardmetaalboor **IMP-XH-135** voorzichtig een gat in het midden van de matrix (tot aan de housing).
3. Verwijder de matrix met een scherp instrument.
4. Plaats de gewenste matrix op de indrukstift **1222** en druk ze in de housing.
5. Controleer of de gewenste retentie bereikt werd.

### Bijwerkingen, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- De attachementen zijn bestemd voor eenmalig gebruik.
- De producten zijn niet-steriel.
- De pasvorm kan negatief beïnvloed worden als de toestand van de patiënt verandert.
- Bacteriële adhesie kan door hygiënemaatregelen worden voorkomen.
- Oneigenlijk gebruik of onjuiste verwerking kan resulteren in vroegtijdige slijtage van de attachementen.
- De functionaliteit van de attachementen wordt negatief beïnvloed door trauma's zoals tandenknarsen (bruxisme).
- Met het oog op de traceerbaarheid raden wij u aan om het lotnummer van de gebruikte producten te vermelden in het patiëntendossier.
- Producten met titanium niet verwarmen.
- Producten met nikkel niet gebruiken bij nikkelallergie.
- De hulpdelen RE H 79 en H 35 moeten buiten de mond worden gebruikt.