

REBASEN/RELINEN VAN EEN PROTHESE MET PRECI-CLIX

TANDARTSPRAKTIJK

1. Breng een weinig zachte was onder de attachmenten aan.
2. Druk een plaatshouder **1251 B** over de patrix in de mond.
3. Breng "stops" uit zachte kneedmassa aan de basale zijde van de prothese aan, ter hoogte van het trigonum retromolare resp. de tuber maxillaris.
4. Breng de patiënt manueel in centrische relatie en behoud deze positie tijdens de uithardingstijd van de kneedmassa.
5. Breng vervolgens afdrukmateriaal aan in de prothese en neem een afdruk. Controleer of de patrix goed insnapt.

LABORATORIUM

1. Verwijder alle afdrukmateriaal uit de matrix.
2. Plaats de modelanaloog **1201 D** of de combinatie **RE H 14 + 1206 C** in de matrixen in de prothese.
3. Vul bij gebruik van de combinatie **RE H 14 + 1206 C** de ruimte tussen het hulpdeel **RE H 14** en de metaalmantel op met was.
4. Giet een hardgipsmodel en bereid het voor een rebasing/relining voor.
5. Gebruik tijdens de verwerking steeds de plaatshouder.
6. Rebase/reline zoals gebruikelijk.
7. Vervang de matrix indien nodig na het afwerken en polijsten (zie INFO 122).

Bijwerkingen, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- De attachmenten zijn bestemd voor eenmalig gebruik.
- De producten zijn niet-steriel.
- De pasvorm kan negatief beïnvloed worden als de toestand van de patiënt verandert.
- Bacteriële adhesie kan door hygiënemaatregelen worden voorkomen.
- Oneigenlijk gebruik of onjuiste verwerking kan resulteren in vroegtijdige slijtage van de attachmenten.
- De functionaliteit van de attachmenten wordt negatief beïnvloed door trauma's zoals tandenknarsen (bruxisme).
- Met het oog op de traceerbaarheid raden wij u aan om het lotnummer van de gebruikte producten te vermelden in het patiëntendossier.
- Producten met titanium niet verwarmen.
- Producten met nikkel niet gebruiken bij nikkelallergie.
- De hulpdelen RE H 79 en H 35 moeten buiten de mond worden gebruikt.