

## VERVANGEN VAN EEN PRECI-SAGIX-MATRIX

In alle PRECI-SAGIX-introductiesets worden matrixen met 3 verschillende retentiewaarden geleverd.

Wanneer de retentie van de matrix niet voldoet aan de gestelde eisen, kan men ze vervangen door een witte matrix die minder retentie geeft **1312** (Mini  $\varnothing$  1,7 mm) of **1362** (Standaard  $\varnothing$  2,2 mm), een gele matrix met normale retentie **1311** (Mini  $\varnothing$  1,7 mm) of **1361** (Standaard  $\varnothing$  2,2 mm) of een rode matrix die meer retentie geeft **1313** (Mini  $\varnothing$  1,7 mm) of **1363** (Standaard  $\varnothing$  2,2 mm).

1. Gebruik een puntig instrument om de matrix te verwijderen.
2. Reinig de uitsparing in het frame met stoom.
3. Breng de matrix met de gewenste retentiewaarde aan met behulp van de universele indrukstift **1323** (voor  $\varnothing$  1,7 mm en 2,2 mm).
4. Controleer of de matrix goed zit en of de gewenste retentie bereikt wordt.

### Bijwerkingen, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- De attachmenten zijn bestemd voor eenmalig gebruik.
- De producten zijn niet-steriel.
- De pasvorm kan negatief beïnvloed worden als de toestand van de patiënt verandert.
- Bacteriële adhesie kan door hygiënemaatregelen worden voorkomen.
- Oneigenlijk gebruik of onjuiste verwerking kan resulteren in vroegtijdige slijtage van de attachmenten.
- De functionaliteit van de attachmenten wordt negatief beïnvloed door trauma's zoals tandenknarsen (bruxisme).
- Met het oog op de traceerbaarheid raden wij u aan om het lotnummer van de gebruikte producten te vermelden in het patiëntendossier.
- Producten met titanium niet verwarmen.
- Producten met nikkel niet gebruiken bij nikkelallergie.
- De hulpdelen RE H 79 en H 35 moeten buiten de mond worden gebruikt.