

## **UTILIZACIÓN DEL PERMA-RET**

1. Determine el lugar exacto donde el hilo PERMA-RET **1602** tiene que ser posicionado.
2. Coloque en el micromotor una fresa **1606** para perforar un agujerito en el diente de unos 3 mm.
3. Fije el hilo en el tenedor de hilo **1604**.
4. Atornille el hilo en la cavidad sin presión.
5. Corte el hilo hasta el largo deseado con una pinza o un disco fino. Eso hasta unos 4 mm de largo.
6. Doble la extremidad del hilo o aplástelo. Esta parte servirá de retención para el acrílico.

### **Efectos secundarios, advertencias y precauciones**

- Los ataches están pensados para un solo uso.
- Los productos no son estériles.
- Existe el riesgo de mal ajuste cuando las condiciones del paciente cambien.
- La adhesión bacteriana puede evitarse aplicando medidas apropiadas de higiene.
- El uso inapropiado o la elaboración inadecuada puede producir un desgaste prematuro de los ataches.
- La funcionalidad de los ataches se verá afectada negativamente por traumas como el bruxismo (rechinar los dientes).
- A los efectos de la trazabilidad, le recomendamos que registre el número de lote de los productos utilizados en el archivo de paciente.
- No calentar los productos que contienen titanio.
- No utilizar productos que contienen níquel en el caso de alergia al níquel.
- Los auxiliares RE H 79 y H 35 deben utilizarse fuera de la cavidad bucal.