

## ELABORACIÓN DEL PRECI-VERTIX

1. Determine el eje de inserción de la prótesis.
2. Encere las coronas previendo un apoyo dental.
3. Ponga las partes machos **1803** en el paralelómetro y posícionelas en las coronas paralelas unas a otras al eje de inserción.
4. Recorte el mandril paralelizador **1815** con un bisturi caliente.
5. Ponga el revestimiento y cuele.
6. Termine las coronas y aplique incrustaciones en acrílico o en cerámica. Lustre definitivamente la parte macho.
7. Empuje la parte hembra intercambiable **1802** sobre la parte macho. Coloque las coronas sobre el modelo de trabajo y péguelas. Bloquee el espacio debajo de la parte macho con cera de modo cónico.
8. Haga un duplicado del modelo en revestimiento.
9. Modele una capa de cera de 0,4 mm de espesor alrededor de la reproducción en revestimiento de la parte hembra.
10. Una el encerado de la construcción removible a la capa de cera. Ponga el revestimiento y cuele.
11. Chorree la construcción removible y el interior de las capas metálicas y póngalas en un baño electrolítico. Atención: nunca pula a alto brillo el lado interior de la capa metálica. Así, la fricción de la parte hembra podría desaparecer.
12. Empuje la parte hembra con el auxiliar de inserción **1804** en la capa metálica.
13. Recorte el plano oclusal de la guía de 0,2 mm.
14. Termine de manera habitual.
15. Utilice una parte hembra blanca **1805** con una fricción reducida o una parte hembra roja **1806** con una fricción fuerte cuando la fricción no es satisfactoria (véase INFO 026).

### Efectos secundarios, advertencias y precauciones

- Los ataches están pensados para un solo uso.
- Los productos no son estériles.
- Existe el riesgo de mal ajuste cuando las condiciones del paciente cambien.
- La adhesión bacteriana puede evitarse aplicando medidas apropiadas de higiene.
- El uso inapropiado o la elaboración inadecuada puede producir un desgaste prematuro de los ataches.
- La funcionalidad de los ataches se verá afectada negativamente por traumas como el bruxismo (rechinar los dientes).
- A los efectos de la trazabilidad, le recomendamos que registre el número de lote de los productos utilizados en el archivo de paciente.
- No calentar los productos que contienen titanio.
- No utilizar productos que contienen níquel en el caso de alergia al níquel.
- Los auxiliares RE H 79 y H 35 deben utilizarse fuera de la cavidad bucal.