

REBASE DE UNA PRÓTESIS CON PRECI-CLIP

1. Tome una impresión con los caballitos en sitio.
2. Rellene el espacio de los caballitos y la barra con silicona y cuele un modelo en yeso duro. Utilice un aparato de rebase.
3. Haga el rebase de manera habitual.
4. Active o desactive eventualmente los caballitos después del acabado y del pulido (véase INFO 107).

Efectos secundarios, advertencias y precauciones

- Los ataches están pensados para un solo uso.
- Los productos no son estériles.
- Existe el riesgo de mal ajuste cuando las condiciones del paciente cambien.
- La adhesión bacteriana puede evitarse aplicando medidas apropiadas de higiene.
- El uso inapropiado o la elaboración inadecuada puede producir un desgaste prematuro de los ataches.
- La funcionalidad de los ataches se verá afectada negativamente por traumas como el bruxismo (rechinar los dientes).
- A los efectos de la trazabilidad, le recomendamos que registre el número de lote de los productos utilizados en el archivo de paciente.
- No calentar los productos que contienen titanio.
- No utilizar productos que contienen níquel en el caso de alergia al níquel.
- Los auxiliares RE H 79 y H 35 deben utilizarse fuera de la cavidad bucal.