

ELABORACIÓN DE UNA PARTE MACHO P DEL PRECI-SAGIX

1. Determine el eje de inserción de la prótesis.
2. Seleccione la parte macho apropiado **1321** (Mini \varnothing 1,7 mm) o **1371** (Standard \varnothing 2,2 mm) y colóquela sobre el mandril paralelizador **1300 P**. La parte esférica de la parte macho se adapte en la parte ondulada del mandril paralelizador.
3. Fije la parte macho con cera a las coronas pilares. Controle se hay suficiente espacio para la limpieza con los cepillos interproximales.
4. Quite el mandril paralelizador **1300 P** de la parte macho, deslizando el aro de goma hacia arriba.
5. Coloque los bebederos y prepara todo para el revestimiento.
6. Ponga el revestimiento, precaliente con cuidado y cuele con una aleación dura. No utilice un revestimiento para la técnica de precalentamiento rápido.
7. Arene el colado sin dañar la parte macho.

Efectos secundarios, advertencias y precauciones

- Los ataches están pensados para un solo uso.
- Los productos no son estériles.
- Existe el riesgo de mal ajuste cuando las condiciones del paciente cambien.
- La adhesión bacteriana puede evitarse aplicando medidas apropiadas de higiene.
- El uso inapropiado o la elaboración inadecuada puede producir un desgaste prematuro de los ataches.
- La funcionalidad de los ataches se verá afectada negativamente por traumas como el bruxismo (rechinar los dientes).
- A los efectos de la trazabilidad, le recomendamos que registre el número de lote de los productos utilizados en el archivo de paciente.
- No calentar los productos que contienen titanio.
- No utilizar productos que contienen níquel en el caso de alergia al níquel.
- Los auxiliares RE H 79 y H 35 deben utilizarse fuera de la cavidad bucal.